


INDIVIDUAL-SCHICHTUNG

Die Individualität der angrenzenden Zähne sollte bei der Schichtung berücksichtigt werden. Voraussetzung für eine korrekte Gestaltung sind die Auswahl und Lage der opalisierenden Effekt- und Inzismassen. Durch den Trübungsgrad und die Farbeinstellung der Transluzenz- und Schneideschichten lässt sich gezielt die Helligkeit der Restauration steuern.

- Inzisal
- Occlusal
- Amber
- Transluzent
- Body
- Cervical
- Opaker
- Metall

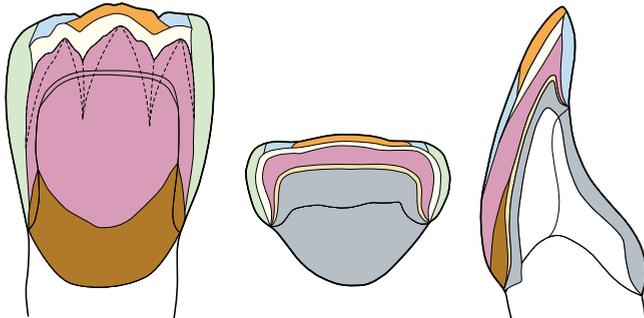

CERAMAGE Inzismassen

Hell
Trüb
Milchig-weiß



Dunkel
Transluzent
Amberfarben

Der Nummerncode der Inzismassen beschreibt die Helligkeit, Transluzenz und Farbwirkung der Inzismassen:


Helligkeit	56 = Hell	61 = Dunkel
Transluzenz	56 = Trüb	61 = Transluzent
Farbwirkung	56 = Milchig-weiß	61 = Amberfarben

Beispiel: Basisschichtung A3,5 = Inzismasse 59
 Individual-Schichtung A3,5 = Anpassung mit Inzismasse 56-58

STANDARD-SCHICHTUNG

Für die Realisierung der Zahnfarbe entsprechend des VITA* Classical Farbrings ist eine Basisschichtung entsprechend der Grafik empfohlen.

- Inzisal
- Transluzent (HVT)
- Body
- Cervical
- Opaker
- Metall

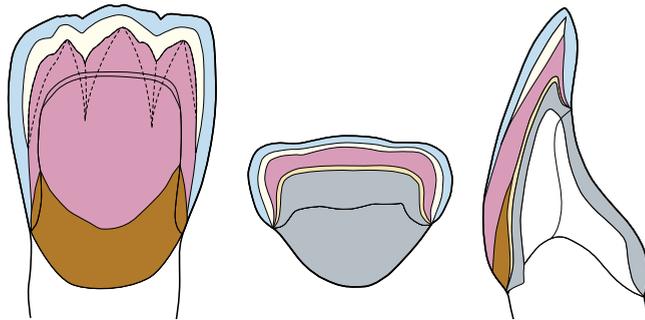

- Cervical**
Reproduktion der korrekten Zervikalfarbe bei geringen Schichtstärken
- Body**
Bildung des Dentinkörpers in einer verkleinerten anatomischen Zahnform
- Transluzent (HVT)**
Unterstützung der bläulichen Transluzenz als Zwischenschicht
- Inzisal**
Abschließende Umschichtung bis zur Mitte des Zahnes für einen natürlichen Lichttransport

* VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen.



SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70 · 40885 Ratingen
 Telefon: 0 21 02 / 86 64-0 · Fax: 0 21 02 / 86 64-65
 E-Mail: info@shofu.de · www.shofu.de