



ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ


Οι υψηλές αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών σήμερα δεν αφορούν μόνο τις κεραμικές αποκαταστάσεις.

Εκτός από το σχήμα και τη λειτουργία του δοντιού, το χρώμα είναι το πιο βασικό και αποφασιστικό κριτήριο για την επιτυχία της αποκατάστασης, ιδιαίτερα στα veneers ή στις αποκαταστάσεις εξολοκλήρου παρασκευασμένες με σκληρές σύνθετες ρητίνες κεραμικά ενισχυμένες όπως το Ceramage ή το Solidex.

Οι φωτοπολυμεριζόμενες παστώδεις χρωστικές LITE ART είναι φθορίζουσες και προσαρμοσμένες στις χρωματικές ιδιαιτερότητες των φυσικών δοντιών. Εφαρμόζονται σε

πολύ λεπτή στρώση και διαθέτουν την ιδιότητα εξαιρετικού επιφανειακού πολυμερισμού χάρη στα νέα πολυλειτουργικά μονομερή και στους φωτοεκκινητές.


Οι χρωστικές LITE ART προσαρμόζονται τέλεια και ως εσωτερικό μακιγιάζ σε ρητίνες, σε σύνθετα υλικά, σε τεχνητά δόντια ή σκελετούς.

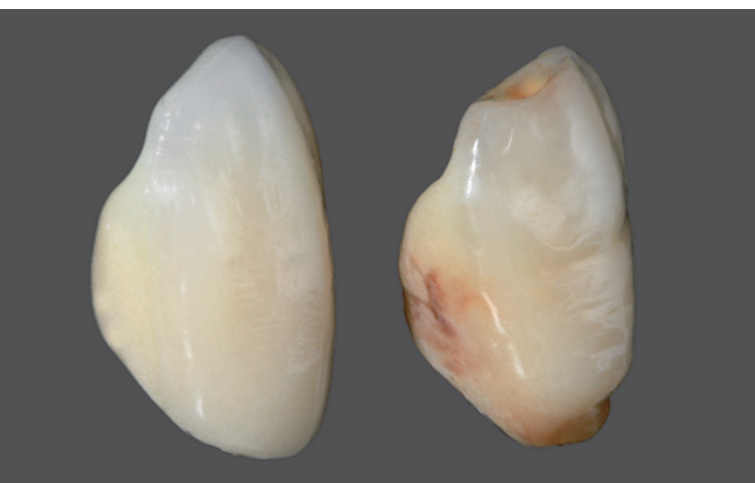

Ενδείξεις

- Χαρακτηρισμός κεραμικά ενισχυμένων ρητινών και συμβατικών σύνθετων ρητινών C&B στεφάνες / γέφυρες, veneers, ένθετα / επένθετα
- Χρωματική προσαρμογή έτοιμων τεχνητών δοντιών δόντια από σύνθετη ρητίνη, ακρυλικά δόντια
- Εξατομίκευση βάσεων τεχνητών οδοντοστοιχιών μερικές οδοντοστοιχίες, σύνθετες ρητίνες ούλων τηλεσκοπικών εργασιών και εμφυτευμάτων, ολικές οδοντοστοιχίες
- Εναρμόνιση προσωρινών σκελετών και ρητινών Σκελετοί PMMA, προσωρινές αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας

Εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική καλυπτικότητα

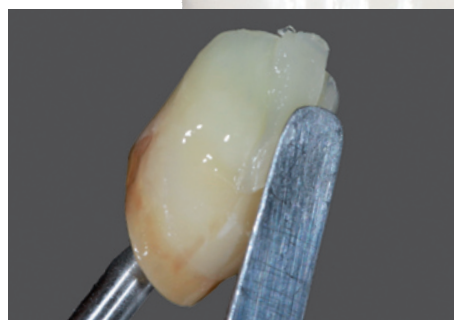

Η εξαιρετική ποιότητα των χρωστικών LITE ART διαφαίνεται ήδη κατά την εφαρμογή. Οι χρωστικές εντυπωσιάζουν με τη λεπτή δομή των σωματιδίων, την ομοιογενή σύσταση και την εξαιρετική καλυπτικότητα με μία και μόνο λεπτή στρώση.

Καλύπτοντας απλά τις πολυμερισμένες χρωστικές με μια στρώση διαφάνειας ή ημιδιαφάνειας, επιτυγχάνονται τα ιδιαίτερα χρωματικά χαρακτηριστικά εκ των έσω.

Χρωματικό σύστημα

Χρώμα		Παράδειγμα εφαρμογής					
	Κωδικός χρώματος	Προσαρμογή χρώματος	Αυχενικά	Χρώση	Κοππικά	Ούλα	Ανάμιξη χρώματος
White	W			○	○		○
Black	B	○		○			○
Red	R					○	○
A-Shade	AS	○	○				
B-Shade	BS	○	○				
Khaki	K		○	○			
Orange	O	○	○	○			
Blue Gray	BI-G				○		
Violet	V	○			○	○	
Orange Brown	O-Br		○	○	○		
Dark Red Brown	DR-Br		○	○			
Black Brown	B-Br		○	○			
Cyan	Cyan						○
Magenta	Magenta						○
Yellow	Y						○

Όλα τα χρώματα LITE ART μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους είτε αναμιγμένα μεταξύ τους. Αναμιγνύοντας τα πρωτεύοντα χρώματα Cyan, Magenta και Yellow επιτυγχάνονται όλες οι εξατομικευμένες αποχρώσεις του κεραμικού συστήματος Vintage Art System.


Για χαρακτηριστικούς χρωματισμούς προσφέρονται δώδεκα προαναμιγμένα χρώματα και αποχρώσεις, κατ' απομίμηση των αποχρώσεων των φυσικών δοντιών και των ούλων.

Φυσικός φθορισμός

Οι παστώδεις χρωστικές LITE ART είναι εξαιρετικά φθορίζουσες, σε αρμονία με τα φυσικά δόντια. Η φυσική τους εμφάνιση διατηρείται ακόμη και σε τεχνητό φως.




Σε φυσικό φως

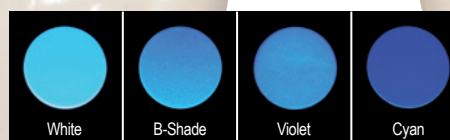

Ακόμη και τα σκούρα χρώματα αντανακλούν δυναμικά και φυσικά σε υπεριώδες φως

Εξατομίκευση ανάλογα με τις απαιτήσεις των ασθενών

Είτε στα κλασσικά veneers με σύνθετες ρητίνες, είτε σε μακράς διάρκειας προσωρινές αποκαταστάσεις ή σε έτοιμα τεχνητά δόντια τα χρώματα LITE ART υποστηρίζουν τις εξατομικευμένες χρωματικές λύσεις για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ασθενών σας.

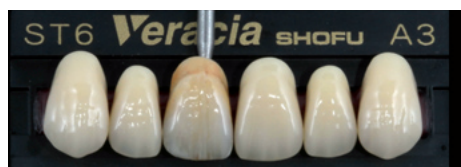

Τα δόντια 13-23 και τα ούλα με LITE ART και CERAMAGE.

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

LITE ART Full Set

Αυτό το σετ περιλαμβάνει όλες τις χρωστικές για αυθεντικά και ατομικά χαρακτηριστικά σύνθετων ρητινών και κεραμικά ενισχυμένων σύνθετων υλικών.

- 15 χρώματα, 1 ml: A-Shade, B-Shade, White, Black, Red, Khaki, Orange, Blue-Gray, Violet, Orange Brown, Dark Red Brown, Black Brown, Cyan, Magenta, Yellow
- Μύτες σωληναρίων / πώματα σωληναρίων, 15 τεμ
- 1 φιάλη CLEAR LIQUID, 6 ml
- 1 UNI BRUSH No. 5 (1 λαβή με 10 πινέλα)
- Χρωματολόγιο, οδηγίες χρήσεως



Κωδικός παραγγ. 1970

LITE ART μεμονωμένα χρώματα

Κάθε ένα από τα 15 έτοιμα προς χρήση χρώματα προσφέρεται σε ειδικά σχεδιασμένα σωληνάρια.

Χάρη στη λεπτή μύτη του σωληναρίου είναι δυνατή η δοσομέτρηση του υλικού και η άμεση εφαρμογή του στην αποκατάσταση. Το σωληνάριο έχει πώμα ασφαλείας.

- Σωληνάριο 1 ml
- Μύτη σωληναρίου / πώμα σωληναρίου, 1 τεμ



Κωδικός παραγγ. 1971 - 1985

CLEAR LIQUID

Με το CLEAR LIQUID είναι δυνατή η προσαρμογή των έτοιμων για χρήση χρωστικών, ανάλογα με την επιθυμητή ένταση και τις προσωπικές προτιμήσεις.

Η απόχρωση των χρωστικών LITE ART δεν επηρεάζεται από την διαφάνεια του υγρού.

- 1 φιάλη, 6 ml



Κωδικός παραγγ. 1986



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
SHOFU DENTAL GmbH Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.
© Copyright 2001 SHOFU INC. All rights reserved.