



ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ



НОВОЕ ТВОРЕНИЕ В ОБЛАСТИ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ


Сегодня пациенты имеют очень высокие запросы к эстетике и желают естественных реставраций фронтальных и боковых зубов не только в керамических конструкциях.

Наряду с формой зуба и функцией цвет является важнейшим критерием при принятии решения в пользу протеза, который облицован или изготовлен из сложносшитого композита с керамическим наполнителем Ceramage или Solidex.

Светоотверждаемые пастообразные краски LITE ART обладают флуоресцентностью и позволяют воспроизводить встречающиеся в природе цветовые эффекты. Они

наносятся тонким слоем практически как в керамике и отлично полимеризуются на поверхности за счет вновь разработанных multifunctional мономеров и фотоинициаторов.


Краски LITE ART отлично адаптируются при выполнении внутренней цветовой модификации пластмасс, композитов, гарнитурных зубов или каркасов.

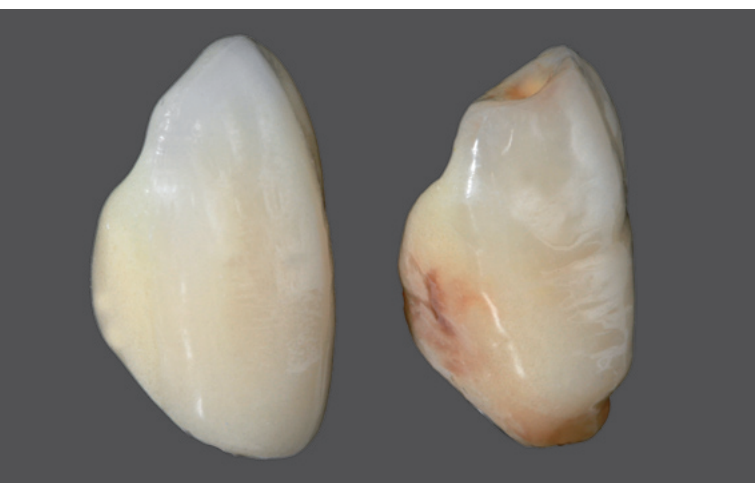

Показания

- **Придание характеристик композитам с керамическим наполнителем и обычным композитам для изготовления коронок и мостовидных протезов**
Коронки/мостовидные протезы, вениры, инлеи/онлеи
- **Модификация цвета гарнитурных зубов**
Зубы из композита, акриловые зубы
- **Придание индивидуальных характеристик базам протезов**
Частичные протезы, компоненты цвета десны из композита в конструкциях с телескопами и имплантатами, полные протезы
- **Модификация временных каркасов и пластмасс цвета зубов**
Каркасы из полиметилметакрилата, долговременные временные протезы

Приятны в работе, отличные покрывные качества

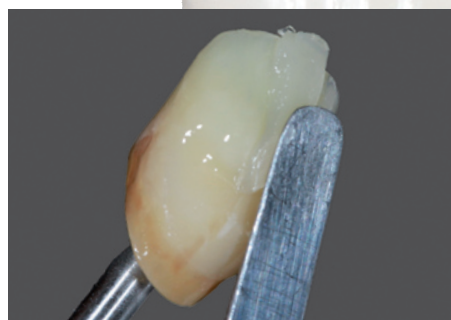

Высокое качество красок LITE ART ощущается уже при нанесении. Они впечатляют за счет микромелкой структуры частиц, однородной консистенции и отличных покрывных свойств при малой толщине слоя.

Путем простого покрытия слоя полимеризованных красок массами для эмали или трансlucentными массами целенаправленно и пространственно выполняются тончайшие акценты.

Цветовая концепция

Цвет		Пример применения					
	Цветовой код	Коррекция цвета	Пришеечная зона	Изменение цвета	Режущий край	Десна	Смесь цветов
White	W			○	○		○
Black	B	○		○			○
Red	R					○	○
A-Shade	AS	○	○				
B-Shade	BS	○	○				
Khaki	K		○	○			
Orange	O	○	○	○			
Blue Gray	BI-G				○		
Violet	V	○			○	○	
Orange Brown	O-Br		○	○	○		
Dark Red Brown	DR-Br		○	○			
Black Brown	B-Br		○	○			
Cyan	Cyan						○
Magenta	Magenta						○
Yellow	Y						○


Все краски LITE ART могут применяться отдельно или смешиваться между собой. Путем смешивания первичных красок Cyan/синий, Magenta/пурпурный и Yellow/желтый возможно воспроизвести все индивидуальные цвета керамической системы Vintage Art. Для придания цветовых характеристик предлагается 12 предварительно замешанных красок и цветовых тонов, которые воспроизводят цветовые эффекты естественных цветов и пигментацию десны.

Естественная флуоресцентность

Пастообразные краски LITE ART обладают высокой флуоресцентностью, соответствующей естественным зубам. Их естественный вид сохраняется даже при искусственном освещении.




При естественном освещении

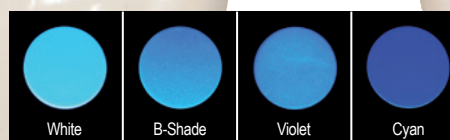

Даже темные цвета при ультрафиолетовом свете выглядят живыми и естественными

Индивидуальность, соответствующая желаниям пациентов

Идет ли речь о классических облицовках композитом, долговременных временных протезах или гарнитурных зубах, краски LITE ART способствуют реализации индивидуальных решений для каждого индивидуального запроса пациентов.

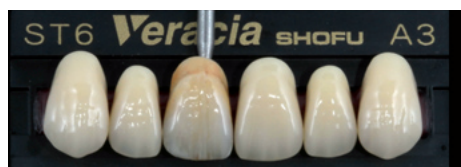

Зубы верхней челюсти 13-23 и десна с индивидуальными характеристиками, выполненными композитом Ceramage и LITE ART.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Полный набор LITE ART

Этот набор включает все компоненты для придания аутентичных и индивидуальных характеристик пластмассам и усиленным керамикой композитам.

- 15 цветов по 1 мл: цвет А, цвет В, белый, черный, красный, хаки, оранжевый, сине-серый, фиолетовый, оранжево-коричневый, темно-красно-коричневый, синий, пурпурный, желтый
- По 15 насадок/колпачков
- 1 флакон CLEAR LIQUID, 6 мл
- Кисточки UNI BRUSH No. 5 (1 ручка и 10 кисточек-насадок)
- Расцветка, инструкция по применению



Кат. номер 1970

Отдельные краски LITE ART

Каждая из 15 готовых к применению красок поставляется в специально разработанных канюлях оригинального дизайна. Тонкая насадка на канюлю позволяет экономно дозировать краски или сразу наносить их на реставрацию. Эластичный колпачок канюли обеспечивает плотное закрытие.

- Шприц 1 мл
- По 1 насадке на канюлю/колпачку к канюле



Кат. номер 1971 - 1985

CLEAR LIQUID

С помощью жидкости CLEAR LIQUID возможно соответственно регулировать интенсивность готовых к применению пастообразных красок с учетом индивидуальных предпочтений.

На естественный цвет красок LITE ART не влияет транспарентность жидкости.

- 1 флакон, 6 мл



Кат. номер 1986

