


Anzeige der Bilder

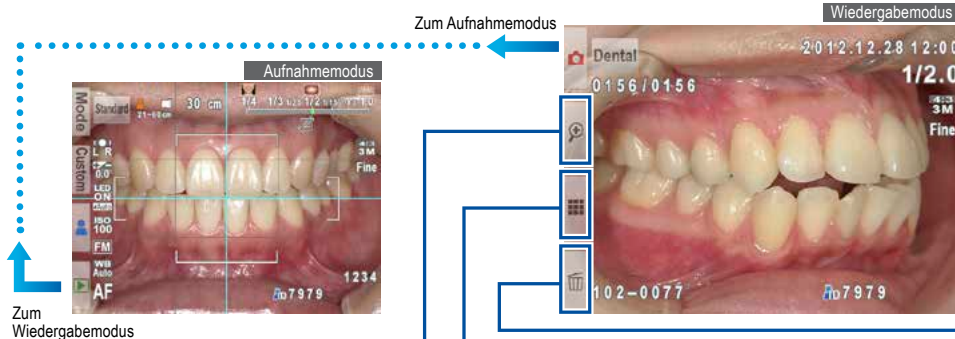

Berühren Sie die Taste im Aufnahmemodus, um zurück zum Wiedergabemodus zu gelangen. Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.

Drehen Sie das Funktionsrad, um durch die Bilder zu scrollen.

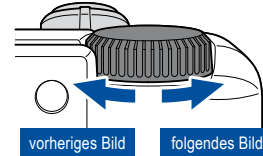


Bild vergrößern



Vorschaubilder

Um ein einzelnes Bild anzusehen, wählen Sie es aus, indem Sie es auf dem Bildschirm berühren.




Bilder löschen

Wenn Sie das Bild löschen wollen, drücken Sie „OK“, um fortzufahren. Oder drücken Sie „Abbrechen“, um den Löschvorgang abzubrechen.



Bearbeitungsfunktionen


Drücken Sie die MENU-Taste, während ein Bild angezeigt wird, das Sie bearbeiten wollen.

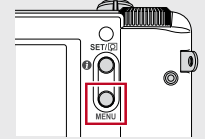

1. Auf Bildern zeichnen
Zeichnen Sie Linien auf die Bilder, indem Sie den Bildschirm berühren.



2. Bilder drehen
Die Bilder können um 90 Grad gedreht werden.

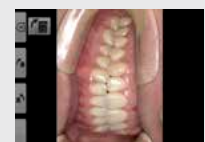

3. Bilder schützen
Schützen Sie die Bilder, um eine versehentliche Löschung oder unbeabsichtigte Bearbeitung zu vermeiden.


Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 34/35 des Benutzerhandbuchs.

Einsetzen der Akkus und SD-Speicherkarte

Einsetzen der Batterien/Akkus


Kompatible Batterien: 4x AA

(wiederaufladbare Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) oder Alkaline-Batterien)

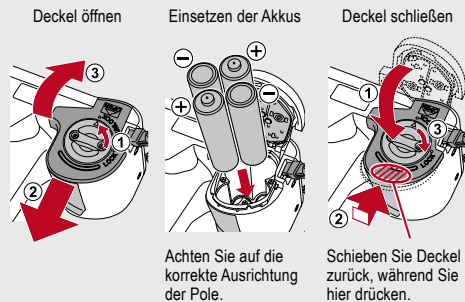


Einsetzen der SD-Speicherkarte

Kompatible SD-Speicherkarten:

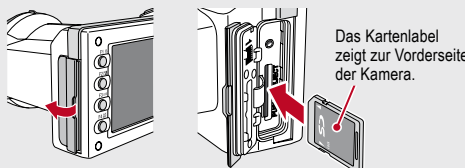


Die SD-, SDHC- und SDXC-Logos sind eingetragene Markenzeichen von SD-3C, LLC.

Aufnahmemodi

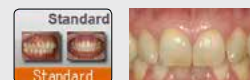


Standardmodus

Für Standard-Intraoralfotografie

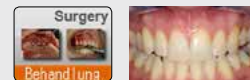

Behandlungsmodus

Für Intraoralfotografie aus einem größeren Behandlungsabstand

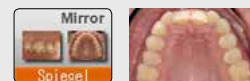


Spiegelmodus

Für Intraoralfotografie mit Spiegel. Das Bild kann nach der Aufnahme um 180 Grad gedreht werden.




Gesichtsmodus

Für Gesichtsaufnahmen, Halb- oder Ganzkörperporträts

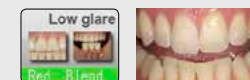


Reduzierte-Blendungs-Modus

Zum Fotografieren von Details im Frontzahn-bereich, an Arbeitsmodellen oder an indirekten Restaurationen

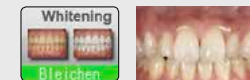


Bleichmodus

Zum Vergleich des Farbtons vor und nach der Zahnbleiche

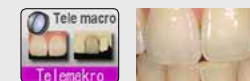

Telemakromodus

Zum Fotografieren von Details im Frontzahn-bereich, an indirekten Restaurationen oder an Arbeitsmodellen mit höherer Auflösung. Setzen Sie die mitgelieferte Makro-Linse auf, wenn Sie in diesem Modus fotografieren.

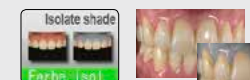

Farbisolierungsmodus

Für eine optimale Farbnahme kann die Zahnfleischfarbe isoliert werden.

EyeSpecial C-III

Quick reference

Manufacturer
SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
[CE] SHOFU DENTAL GmbH Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)