


EyeSpecial C-III

Indicaciones de seguridad importantes

Encontrará la última información sobre EyeSpecial C-III en www.shofu.de.

Contenido del envase

Cuando abra por primera vez el envase de EyeSpecial C-III, compruebe que contenga los siguientes componentes. En caso de que falte alguno, informe a su distribuidor de SHOFU lo antes posible.

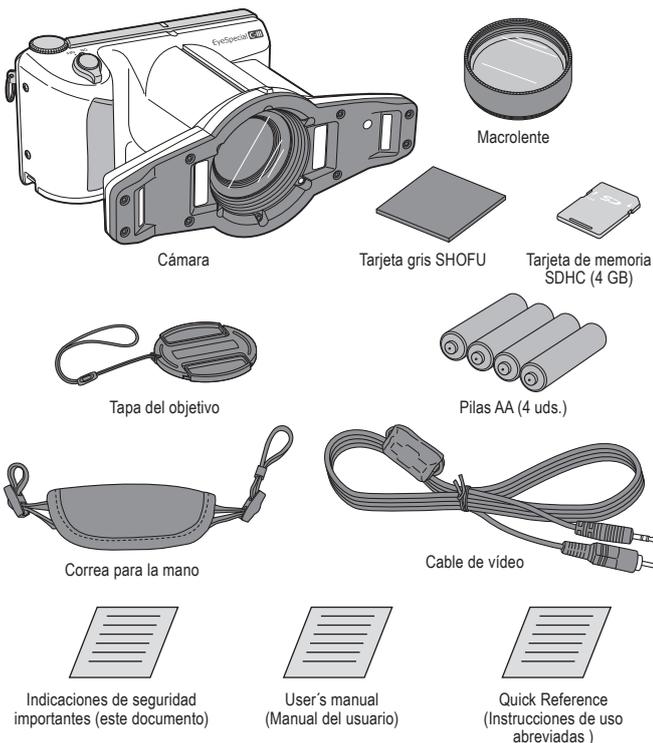

Accesorios opcionales

Los siguientes componentes opcionales, de venta por separado, son necesarios para el funcionamiento de la cámara:

- Medios de grabación: tarjeta SD/tarjeta SDHC* (no compatible con las tarjetas SDXC)
- Pilas AA (pilas alcalinas/baterías recargables de níquel-hidruro metálico [NiMH])

* Si su ordenador tiene una ranura de SD/SDHC, utilice un lector/grabador de tarjetas SD/SDHC para transferir los datos de su tarjeta de memoria a su ordenador.

Indicaciones de seguridad

Lea atentamente las siguientes indicaciones para utilizar el producto de forma segura.

Descripción de los símbolos de „Advertencia“ y „Cuidado“

Estas indicaciones de seguridad se representan utilizando los símbolos que se explican a continuación. El objetivo es evitar accidentes que puedan provocar lesiones o incluso la muerte. Para utilizar el aparato de forma segura es importante conocer el significado de estos símbolos.

	Advertencia El símbolo de „Advertencia“ señala una posible situación de peligro que, en caso de no evitarse o no corregirse, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
	Cuidado El símbolo de „Cuidado“ señala una posible situación de peligro que, en caso de no evitarse o no corregirse, puede provocar lesiones leves o moderadas o daños materiales.

Otras indicaciones y símbolos

A continuación se explican otras indicaciones y símbolos que se utilizan en el manual del usuario:

Nota Señala un posible fallo de funcionamiento que puede producirse en caso de no respetar la descripción.

Info Explicación adicional para facilitar el manejo de la cámara.

Durante el uso

Advertencia

- **Si la cámara se sobrecalienta, desprende un olor a quemado, echa humo o se aprecia cualquier otro comportamiento llamativo durante el manejo, deje de utilizarla de inmediato y retire las pilas del aparato. Las pilas también podrían sobrecalentarse. Tenga cuidado al retirar las pilas.**
En caso de no respetar estas advertencias y seguir utilizando el aparato, pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras y la combustión espontánea. Póngase en contacto de inmediato con su distribuidor de SHOFU para que le reparen la cámara.
- **Si algún componente interno de la cámara se suelta, debido por ejemplo a una caída o al deterioro, deje de utilizarla de inmediato y retire las pilas del aparato. Tenga cuidado de no tocar los componentes sueltos.**
El flash funciona con alta tensión y puede provocar descargas eléctricas. En caso de no respetar estas advertencias y seguir utilizando el aparato, pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras y fuego. Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU para que le proporcione instrucciones para el mantenimiento y el cuidado.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
Cuando se utilice la cámara cerca de los niños hay que extremar las precauciones para evitar accidentes o lesiones.

- **No desmonte nunca la cámara ni intente repararla usted mismo/a o realizar el mantenimiento correctivo.**

La cámara contiene algunas piezas conductoras de alta tensión. Tocar los componentes internos podría dar lugar a una descarga eléctrica. La manipulación inadecuada puede además provocar un fallo de funcionamiento de la cámara que, a su vez, podría causar lesiones, descargas eléctricas o fuego. Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU cuando necesite una reparación o un mantenimiento correctivo.

- **Utilice exclusivamente las pilas indicadas para esta cámara. No deben utilizarse pilas deformadas ni dañadas.**
El uso de pilas defectuosas puede provocar la salida de líquido, fuego o explosiones.
- **No accione el flash cuando se encuentre cerca de los ojos de las personas. Utilice unas gafas de protección cuando tenga que accionar el flash cerca de los ojos.**
La intensa luz del flash puede dañar los ojos de las personas.
- **En caso de que haya un cuerpo extraño (metal, líquido o polvo) en el interior de la cámara, deje de utilizar la cámara de inmediato y retire las pilas del aparato.**
El uso prolongado de la cámara podría provocar fuego o descargas eléctricas. Póngase en contacto con el distribuidor que le ha vendido el producto para obtener asistencia.
- **No utilice esta cámara en entornos muy reducidos, como una bolsa, una caja o un cajón.**
Esto puede generar calor o incluso provocar fuego, ya que la disipación del calor es insuficiente.
- **No utilice esta cámara en lugares en los que pueda mojarse con facilidad, como cerca de lavabos, fregaderos, recipientes con agua u otros lugares en los que se utilice agua. No coloque ningún recipiente que contenga agua sobre la cámara.**
Pueden producirse descargas eléctricas o fuego.
- **No utilice esta cámara en lugares que puedan contener gases fácilmente inflamables o en lugares en los que se almacene gasolina, benzol o diluyentes.**
Pueden producirse explosiones o fuego.

Cuidado

- **Evite el contacto con la piel cuando utilice la cámara durante un tiempo prolongado.**
La carcasa de la cámara se calienta y podría provocar quemaduras.
- **Cuando utilice la cámara durante un tiempo prolongado, no retire las pilas ni la tarjeta SD de inmediato.**
Las pilas y la tarjeta SD pueden calentarse durante el uso. Tocar las pilas y las tarjetas SD calientes puede provocar quemaduras. Apague la cámara y espere hasta que se haya enfriado.
- **No accione el flash cuando esté cubierto por su dedo o por cualquier otro objeto.**
El flash irradia calor y puede causar quemaduras.

- **No presione en exceso la pantalla de cristal líquido ni utilice la fuerza.**
Esto podría romper la pantalla y, como consecuencia, causar lesiones. En caso de que el líquido interno entre en contacto con la piel, enjuague su piel con agua de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese de inmediato con agua abundante y consulte a un médico.
- **Manipule la cámara y los accesorios con cuidado.**
La manipulación imprudente o inadecuada puede provocar lesiones.
- **Utilice siempre la correa de la mano para evitar las lesiones que podría causar la caída accidental de la cámara.**
- **La correa de la mano debe revisarse con frecuencia para comprobar si se ha aflojado o está empezando a deshilacharse.**
- **De no prestar atención a las anomalías y seguir utilizando la cámara, pueden producirse lesiones o daños materiales.**

Mantenimiento y almacenamiento

Advertencia

- **Los componentes pequeños deben mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar que se los traguen por accidente.**
En caso de que un niño/a se trague algún componente de este producto, debe acudir de inmediato a un médico.
- **Para la limpieza de la cámara, no utilice ninguna sustancia fácilmente inflamable como el benzol o los diluyentes.**
Pueden producirse explosiones o fuego.

Cuidado

- **Evite utilizar y almacenar esta cámara (incluidas las pilas) bajo la radiación directa del sol, elevadas temperaturas, elevada humedad ambiental o cerca del fuego. El uso o el almacenamiento en lugares donde haya gases nocivos o cerca de aparatos que generen fuertes magnetismos u ondas electromagnéticas debe evitarse en todo momento.**
El uso o el almacenamiento de la cámara en dichos lugares puede dañarla, deformarla, provocar la salida del líquido de las pilas, generar calor y provocar explosiones, fuego o lesiones.



Manufacturer

SHOFU INC., 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD., 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

SHOFU DENTAL CORPORATION, 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK, Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD., No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China

SHOFU DENTAL GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)