

CERAMAGE^{UP}

Composito microibrido fluido, fotopolimerizzabile
per la tecnica di stratificazione libera



Diverso in modo convincente

I requisiti richiesti ad un sistema di rivestimento estetico sono in continuo mutamento. I pazienti hanno aspettative molto elevate e desiderano un risultato dall'effetto il più naturale possibile non solo con i restauri in ceramica. Per questo è importante offrire soluzioni perfette anche con materiali a ridotto contenuto di ceramica.

Con Ceramage Up si è sviluppato un composito micro-ibrido di altissima qualità che stabilisce nuovi parametri di riferimento nel campo dei materiali fotopolimerizzabili per rivestimento estetico e per restauri.


Questo moderno composito ad alte prestazioni unisce in un unico materiale tutte le caratteristiche positive del composito e della ceramica.

La viscosità tissotropica delle masse pronte all'uso permette inoltre di modellare liberamente le forme dentali direttamente dal dispenser, con una sonda o un pennello.



Naturalmente indistinguibile

Le proprietà foto-ottiche delle masse opalescenti Ceramage UP incisali e traslucenti riprendono quelle dei denti naturali. Il risultato è un restauro dall'aspetto naturale, con una straordinaria brillantezza in ogni condizione di luce.

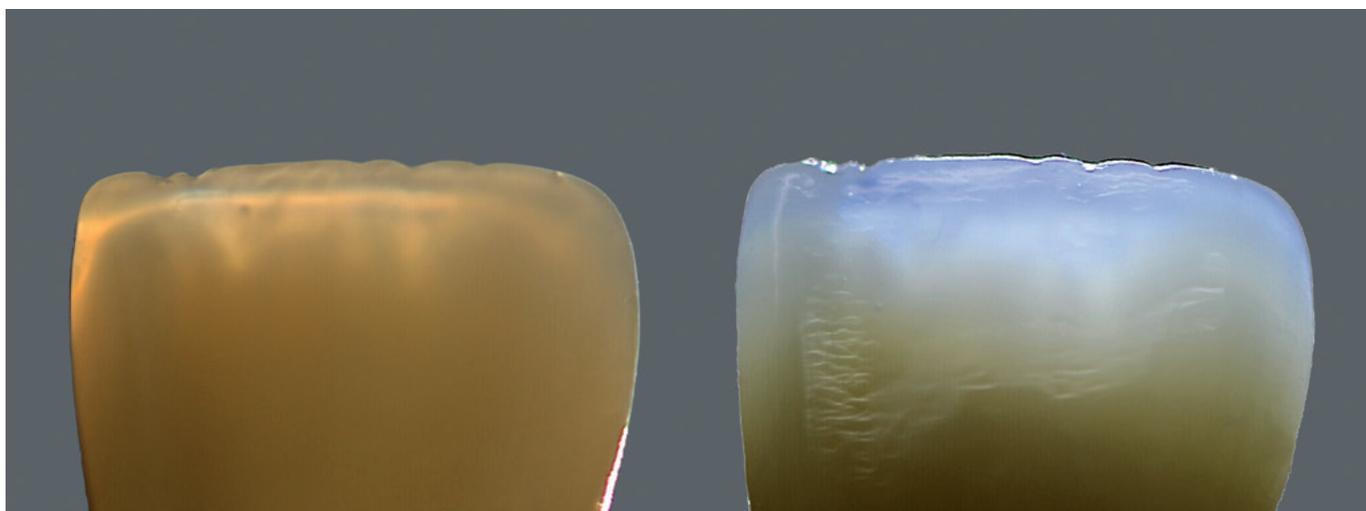

Un sistema completo per tutte le indicazioni

Ceramage UP combina in modo unico i vantaggi di economicità ed efficienza in un sistema completo e compatto. Inoltre questo materiale high-tech è molto stabile, elastico e altamente estetico.

Diversamente dalla ceramica, Ceramage UP è in grado di assorbire le forze, una caratteristica positiva nel caso di carichi occlusali elevati.


L'ampio spettro di indicazioni comprende tutti i tipi di restauri estetici duraturi per denti anteriori e posteriori, con un elevato comfort per il paziente.

- Corone e ponti totalmente rivestiti
- Strutture telescopiche e sovrastrutture su impianti totalmente rivestite
- Lavori su attacchi
- Rivestimenti occlusali
- Inlay / onlay
- Faccette
- Provisori a lungo termine
- Caratterizzazione di denti per protesi




Unico

Grazie alla matrice con riempitivi ceramici e alla struttura di particelle ultrafini compattata in modo omogeneo, Ceramage UP garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione, alla flessione e stabilità cromatica. La sua composizione rende unico questo materiale da rivestimento estetico.

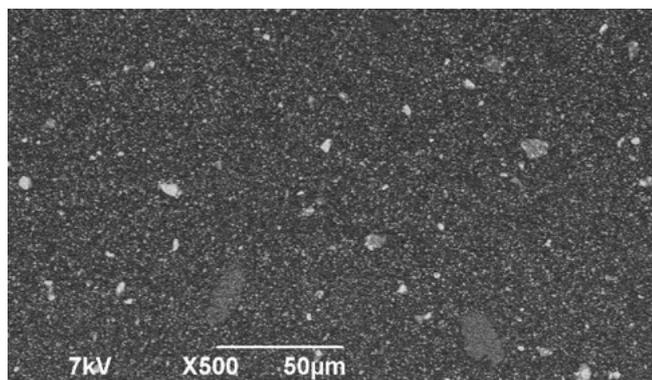


I compositi fluidi convenzionali spesso contengono una quantità ridotta di riempitivi con una distribuzione strutturale non uniforme.

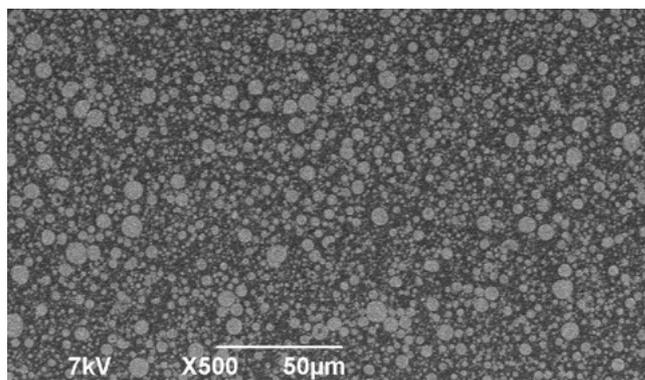

La struttura di particelle ultrafini omogenea e compattata rende Ceramage UP fluido e tuttavia stabile.

Moderno ed efficace

Un composito moderno deve soddisfare diversi criteri: colori naturali per un'estetica convincente, elevata resistenza ed elasticità, nonché un'eccellente lucidabilità e stabilità nel tempo. Con Ceramage UP vengono soddisfatti tutti i requisiti di un restauro di elevato valore qualitativo.

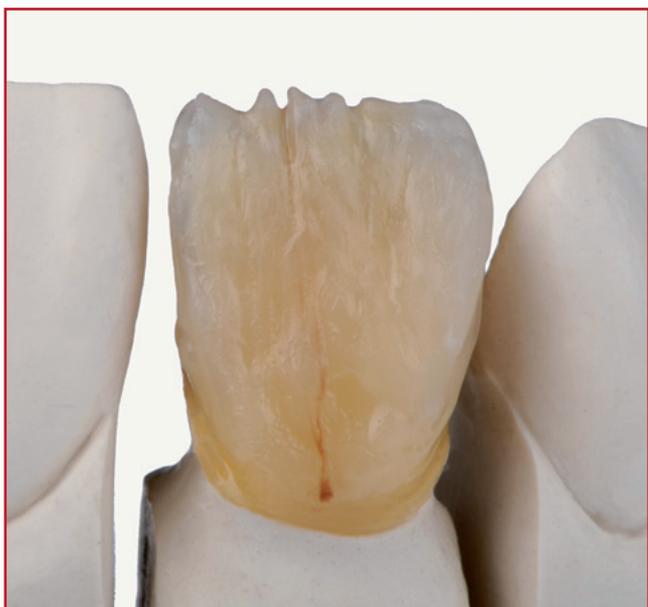

Highlight

Spettro di indicazioni quasi illimitato

Riproduzione facile ed efficiente di tutti i colori della scala VITA* Classical

Estetica ed opalescenza naturali

Resistenza e comportamento all'abrasione eccellenti

Adesione sicura a tutte le leghe dentali e ai materiali per strutture in ceramica e ceramica ibrida con SHOFU Universal Primer e il sistema adesivo CRB

Eccellente lucidabilità e densità della superficie

Resistenza alla placca e stabilità cromatica

Individualizzabile e sicuro

Per ottenere un aspetto ancora più personalizzato dei restauri anteriori e posteriori, è possibile miscelare comodamente le singole masse fluide. Nei materiali in pasta la miscelazione provoca spesso la formazione di numerose bolle e una consistenza non omogenea. Le masse fluide Ceramage UP offrono massima versatilità e sicurezza.

Miscelandole come le masse ceramiche, è possibile ottenere qualsiasi colore intermedio secondo le esigenze cromatiche individuali.



Soddisfa i massimi requisiti di versatilità ed estetica

Il sistema di rivestimento estetico Ceramage UP ha una struttura modulare e tutti i colori dei suoi componenti sono armonizzati tra loro.

Colori di base


Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	rootA	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
SHOFU UNIVERSAL OPAQUE	A1O	A2O	A3O	A3,5O	A4O	rootAO	B1O	B2O	B3O	B4O	C1O	C2O	C3O	C4O	D2O	D3O	D4O
CERVICAL	—	AC1	AC2	—	—	—	BC1	BC2	—	—	CC1	CC2	—	—	DC1	DC2	—
OPAQUE DENTIN	ODA1	ODA2	ODA3	ODA3,5	ODA4	ODrootA	ODB1	ODB2	ODB3	ODB4	ODC1	ODC2	ODC3	ODC4	ODD2	ODD3	ODD4
BODY	A1B	A2B	A3B	A3,5B	A4B	rootAB	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
INCISAL	58	59	60	57	58	59	60	58	59	60	59	60	59	60	59	60	59

I colori di base corrispondono alla scala colori VITA® Classical

Colori Whitening

Un numero crescente di pazienti si sottopone a sbiancamento dentale. Con i colori Whitening di Ceramage UP è possibile adeguare i restauri in modo mirato alle gradazioni dei denti sbiancati. I colori Whitening da W0 a W3 corrispondono ai colori Bleach da BL1 a BL4.

Colore	W0	W1	W2	W3
SHOFU UNIVERSAL OPAQUE	W0O	W2O	W3O	—
BODY	W0B	W1B	W2B	W3B
INCISAL	56	57	—	—

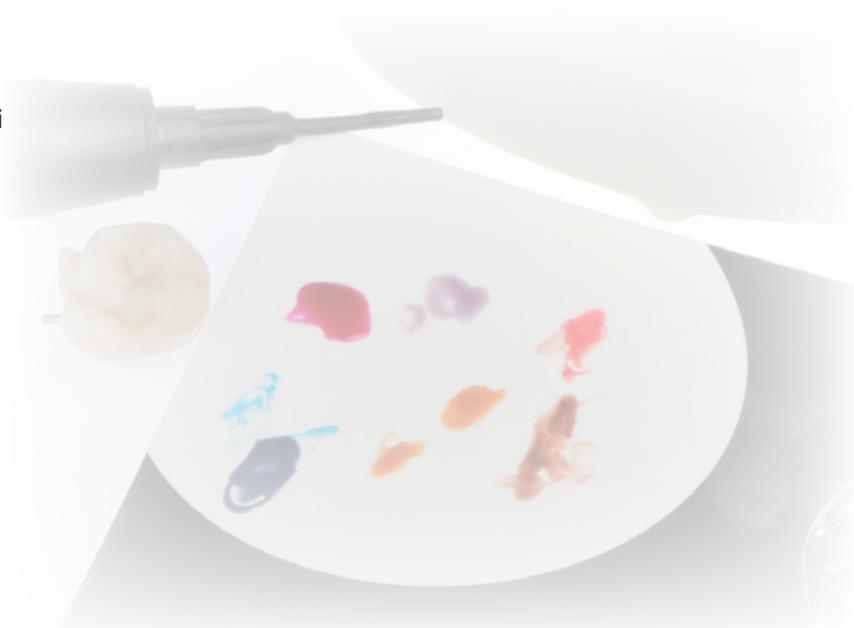

Colori per effetti e colori gengiva

Oltre alle masse incisali di base, il sistema Ceramage UP comprende anche numerose masse traslucide per effetti e intensive. Questa ampia gamma permette all'odontotecnico di soddisfare con successo i più alti requisiti estetici.

Per la gengiva è possibile scegliere tra 11 gradazioni di colore.

SHOFU UNIVERSAL OPAQUE	MO	BGO	GO	WO	GUM-O	RO	VPO	VRO	PO	PreO	
TRANSLUCENT	T	HVT	LVT	T-Glass	BG	GT	CT-A	CT-B	—	—	
INCISAL	56	57	58	59	60	—	—	—	—	—	
CONCENTRATE	MY	WE	OC	AM-Y	W	—	—	—	—	—	
GUM COLOR	GUM-L	GUM-D	GUM-Or	GUM-Br	GUM-V	GUM-R	GUM-LP	GUM-DP	GUM-SP	GUM-P	GUM-T

Informazioni per gli ordini



CERAMAGE UP 8 Color Set

L'assortimento base per la realizzazione di restauri nei colori da A1 a A4, B2, B3 e C2

PN 2305 **




CERAMAGE UP 2 Color Set

Kit introduttivo alla tecnica Ceramage UP; per restauri nei colori A2 e A3

PN 2306 **

Prodotti correlati

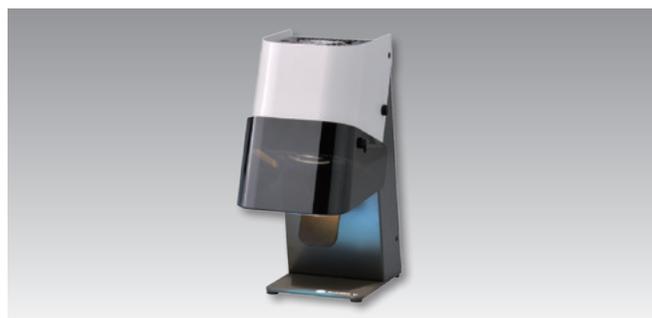

Sublite V

Per una prepolimerizzazione efficace e delicata

PN 5108



Solidilite LED

Eccezionale potenza LED con un ampio spettro di lunghezze d'onda per compositi da rivestimento estetico fotopolimerizzabili

PN E031



Lite Art Full Set

15 supercolori in pasta fluorescenti e fotopolimerizzabili per caratterizzazioni individuali

PN 1970



SHOFU Universal Primer

Per un'adesione sicura dei compositi con tutte le leghe dentali, ossido di zirconio e di alluminio

PN Y0060



CRB - Ceresin Bond

Unioni stabili ideali tra compositi, resine e ceramiche

PN 1741

* VITA è un marchio registrato di VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen / Germania.

** SHOFU Universal Primer deve essere ordinato separatamente.

