

# OneGloss M

## MOUNTED

Acabado y pulido en un solo paso  
para composite y esmalte



# Acabado y pulido con un

Los pulidores de silicona OneGloss M de un solo paso contienen óxido de aluminio y proporcionan el acabado ideal para todos los tipos de restauraciones de materiales compuestos simplemente al modificar la presión de contacto, desde el acabado hasta el pulido.

- OneGloss M están montados en mandriles de contra-ángulo (CA) de acero inoxidable y son esterilizables
- El acabado se realiza con una fuerte presión de contacto (aprox. 1,0 N)
- El pulido se realiza con una presión de contacto ligera (aprox. 0,3 N)
- Eliminación del exceso de composite o cemento y pulido del esmalte con presión de contacto moderada a ligera
- Pulido del esmalte después del descementado ortodóntico, después de la limpieza o para la eliminación de la decoloración de los dientes con una ligera presión de contacto
- Rango de velocidad recomendado  $3.000 \text{ min}^{-1}$  -  $10.000 \text{ min}^{-1}$  con spray de agua intermitente; la velocidad máxima permitida de  $15.000 \text{ min}^{-1}$  no se debe exceder



# instrumento

## Selección de la forma

La línea de productos incluye cuatro formas, que están adaptadas para las superficies que se van a tratar.


### Copa

para cúspides,  
incisal y oclusal



### Midipunta

para labial, lingual,  
bucal, oclusal

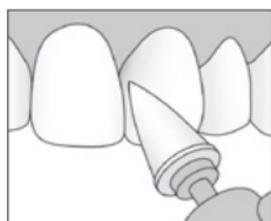


### Minipunta

para fisuras,  
cervical



### IC

para labial, lingual,  
bucal, interproximal

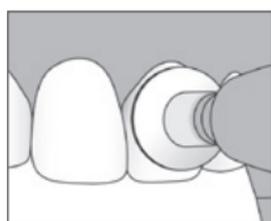

# Información de pedidos

## OneGloss M

Con mandril de contra-ángulo (CA), 12 piezas por caja



Forma: Minipunta

Ref. 0186



Forma: Copa

Ref. 0187



Forma: Midipunta

Ref. 0188



Forma: IC

Ref. 0189



Manufacturer  
**SHOFU INC.**

11 Kamitakamatsu-cho,  
Fukuine, Higashiyama-ku,  
Kyoto 605-0983, Japan

[EC] [REP] SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

www.shofu.de