

OneGloss M

MOUNTED

Finition et polissage de
composite et de l'émail en une étape



Finition et polissage avec

Les polisseurs siliconés OneGloss M en une étape contiennent de l'alumine. Ils procurent sa finition à toute restauration composite en modifiant simplement la pression de contact pour passer de la finition au polissage.

- Les polissoirs OneGloss M sont montés sur contre-angle avec mandrin inox et sont stérilisables
- La finition requiert une pression plus élevée (environ 1,0 N)
- Pour le polissage, pression légère (environ 0,3 N)
- L'élimination des excès de composite ou de ciment et le polissage de l'émail demandent une pression de modérée à légère
- Le polissage de l'émail après dépose d'appareillage orthodontique, réduction ou élimination de coloration demande une pression légère
- Vitesse de rotation recommandée 3.000 min⁻¹ - 10.000 min⁻¹ sous spray intermittent; ne jamais dépasser 15.000 min⁻¹



le même instrument

Choix des formes

Quatre formes sont disponibles qui correspondent au mieux aux surfaces à traiter.


Cupule

Pour cuspside, incisal et occlusal



Midipoint

Pour labial, lingual, buccal, occlusal

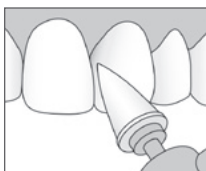


Minipoint

Pour fissure, cervical



IC

Pour labial, lingual, buccal, interproximal

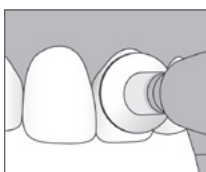

Pour commander

OneGloss M

avec mandrin CA, 12 pces par boîte



Forme: Minipoint

Réf. 0186



Forme: Cupule

Réf. 0187



Forme: Midipoint

Réf. 0188



Forme: IC

Réf. 0189



Manufacturer
SHOFU INC.

[EC] [REP] SHOFU DENTAL GmbH
An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

www.shofu.de