



Lebensqualität

mit
schönen
Zähnen



Liebe Patientin, lieber Patient,

gesunde, natürliche Zähne sind ein kostbares Gut, denn sie sind ein Teil Ihrer Gesundheit. Irgendwann im Leben eines Menschen kommt einmal der Zeitpunkt, an dem man sich mit dem Thema Zahnersatz beschäftigen muss.

Ein perfekter Zahnersatz schafft Wohlbefinden, weil Sie mit ihm gut essen und trinken, sprechen und lachen können und natürlich gut damit aussehen.

Für die Erhaltung und die Wiederherstellung Ihrer Zähne und deren Funktion schaffen Ihr Zahnarzt und die Zahntechniker im Dentallabor für Sie die optimale, individuelle prothetische Versorgung nach den neuesten Erkenntnissen und mit besten Materialien.



CERAMAGE und CERAMAGE UP von SHOFU sind Verblendwerkstoffe, die Ihnen eine ansprechende Ästhetik bieten und sich auch klinisch bestens bewährt haben.

So natürlich Ihr Zahnersatz wirkt, genauso will er gepflegt werden, damit er Ihnen viele Jahre Freude bereitet.

In dieser Kurzinformation haben wir für Sie einige wichtige Hinweise für die tägliche Pflege von herausnehmbaren Teilprothesen zusammengestellt.



Über die tägliche Pflege

- Reinigen Sie Ihren Zahnersatz wie Ihre natürlichen Zähne weiterhin zwei bis dreimal täglich.
- Verzichten Sie auf Reinigungstabletten, Reinigungslösungen oder -konzentrate. Unter Umständen schaden sie Ihrer hochwertigen Versorgung mehr als sie nützen.
- Verwenden Sie für die tägliche gründliche Reinigung eine weiche Zahnbürste mit abgerundeten Nylonborsten oder eine spezielle Prothesenreinigungsbürste.
- Benutzen Sie am besten Zahngels, die zumeist nur feine Schleifpartikel enthalten.
- Bürsten Sie bitte gründlich in den Zahnzwischenräumen und auch dort, wo Ihre Teilprothese Kontakt zu den natürlichen Zähnen hat. Schwer zugängliche Bereiche lassen sich zum Beispiel leicht und schonend mit Interdentalbürsten reinigen.
- Reinigen Sie Ihren herausnehmbaren Zahnersatz über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Sollte er Ihnen entgleiten, wird er keinen Schaden nehmen.





Die intensive Reinigung

Sind Sie Raucher oder trinken Sie gerne täglich mehrere Tassen Kaffee oder Tee? Nehmen Sie häufig eingefärbte Medikamente ein?

- Benutzen Sie anstelle von Zahngels konventionelle Zahnpasten ohne stark abrasive Schleifpartikel.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger oder ätzende Flüssigkeiten.
- Gehen Sie regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen zu Ihrem Zahnarzt.

Ihr Zahnarzt oder die Prophylaxeberaterin in der Zahnarztpraxis berät Sie gerne über die angemessene Pflege Ihrer prothetischen Versorgung!

Praxis- / Laboranschrift



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

www.shofu.de