

Un formidable duo pour sécuriser les collages



CRB – Ceraresin Bond

Avec le système **Ceraresin Bond**, on peut maintenant coller de façon sûre et durable divers matériaux, en intra- ou extra-oral.

Par exemple, **Ceraresin Bond** est apte à compléter rapidement des restaurations céramiques à l'aide de matériaux photopolymérisables. De plus, **CRB** peut combiner des résines polymérisables à froid avec des composites photopolymérisables, comme différents composites photo entre eux. Il n'y a pas de limite à la caractérisation des dents artificielles avec les matériaux photopolymérisables.

Les réactifs **Ceraresin Bond** résistent extrêmement bien à l'humidité et aux contraintes thermiques.




Sécuriser les collages sans aucun compromis

Ceraresin Bond apporte une haute fiabilité dans la liaison entre les composites (photo ou autopolymérisables) et les céramiques.


Les manipulations sont aisées et conviennent à toutes les indications intra- / extra-oral rencontrées dans les cabinets dentaires ou laboratoires de prothèses.

L'utilisation de **CRB** garantit à très long terme une liaison parfaite.

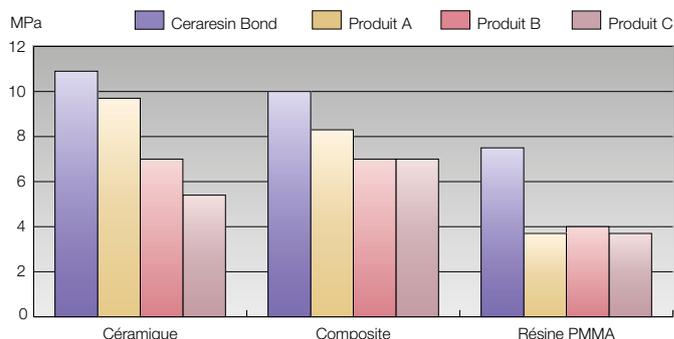


Résistance à l'adhésivité de **Ceraresin Bond** dans la liaison composite / céramique face à d'autres fabricants.


Application simple et rapide

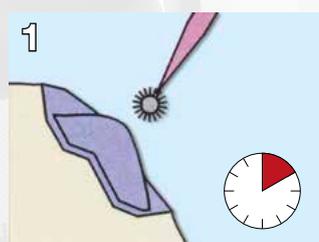

Appliquer CRB 1 / laisser agir 10 secondes

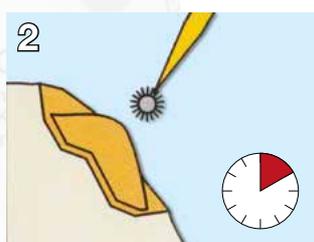

Appliquer CRB 2 / laisser agir 10 secondes

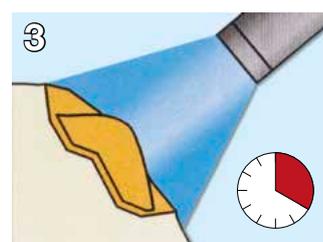

Photopolymériser pendant 20 secondes / prêt pour l'application du composite

Multiples possibilités

- Utilisation intra- et extra-oral
- Restauration de couronnes ou de bridges céramiques avec des composites de reconstitution
- Modification de dents artificielles (résine ou céramique) à l'aide de composites
- Adhésion optimale de résines autopolymérisables sur composites photopolymérisables
- Accroissement de l'adhérence des dents acryliques avec liaisons croisées sur les résines prothétiques autopolymérisables
- Combinaison avec SHOFU Universal Primer pour des restaurations sur métal



Kit CRB, Réf. 1741



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com