


Veracia & Veracia SA

Tanden en kiezen die elkaar weten te vinden


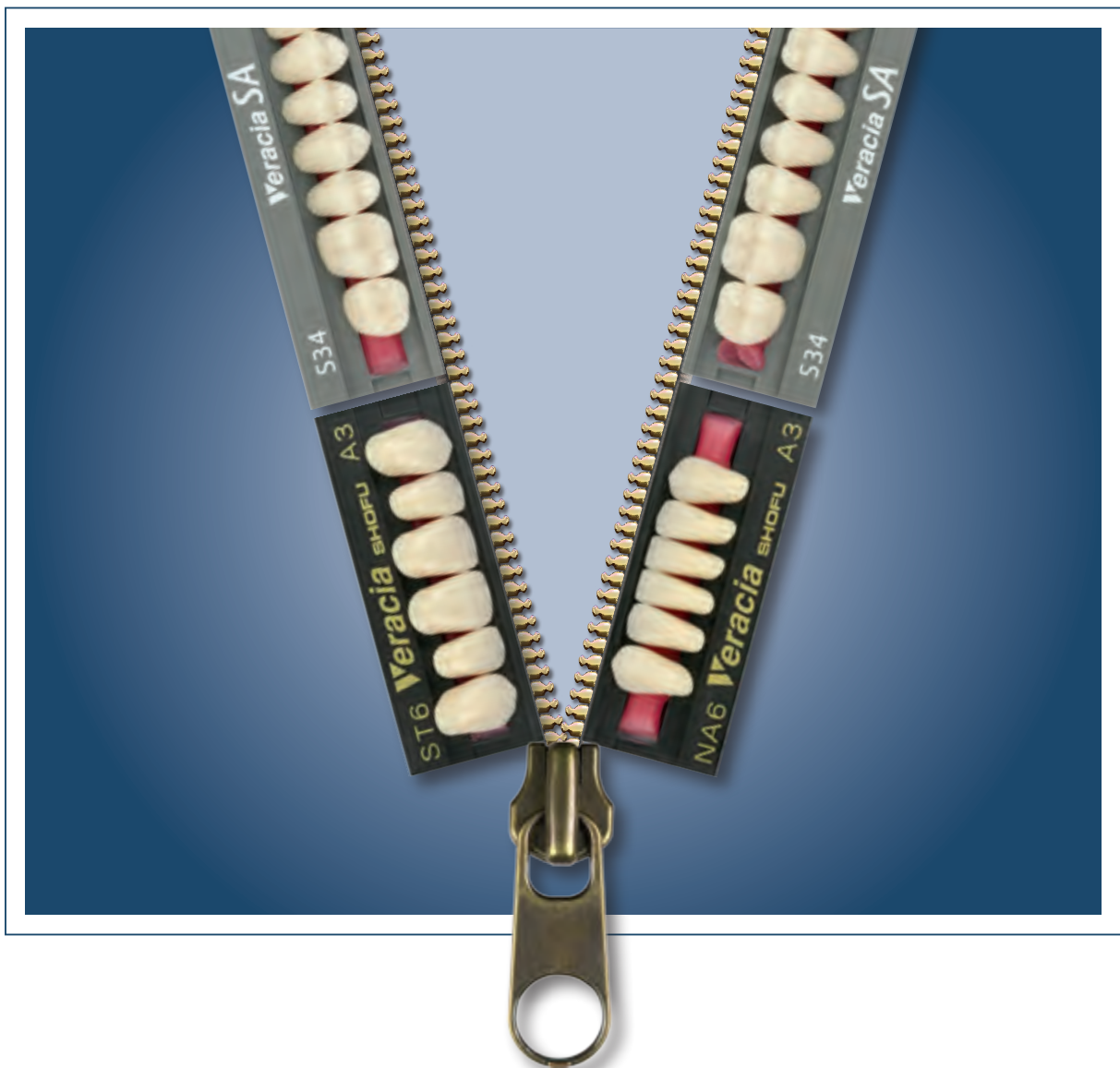


Tanden en kiezen met een natuurlijke uitstraling

De vormen van de composietelementen Veracia Anterior en Posterior zijn gecreëerd met behulp van de modernste CAD/CAM-technologie en volgen de anatomie van natuurlijke gebitselementen. De elementen hebben een uitstekende esthetiek en een levendig vormgegeven oppervlaktestructuur. Ze zijn multifunctioneel toepasbaar en geschikt voor alle soorten opstellingen van volledige en partiële prothesen.




De convexe vorm van de labiale vlakken zorgt voor een goede lipvulling en geeft de prothese een mooi aanzien. De vorm van de palatinale en incisale randen zorgt voor een goede geleiding bij de functionele bewegingen en voor een groot spraakcomfort.

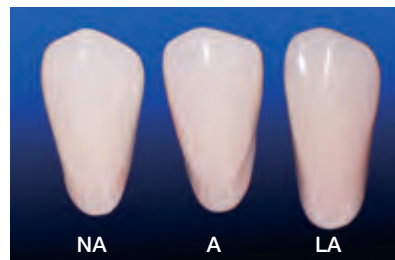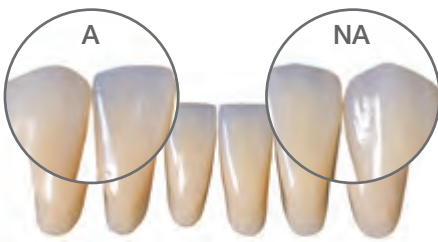

Naast drie verschillende maten zijn er twee typen verkrijgbaar met verschillende abrasie (jonge/oude patiënt). Het type 'NA' correspondeert met niet-geabradeerde gebitselementen. De typen 'A' en 'LA' zijn licht geabradeerd.

Multifunctioneel in vorm en gebruik

De morfologische en functionele karakteristieken van de Veracia-(pre)molaren zijn, net als die van de frontelementen, in alle drie de maten (S, M, L) harmonisch op elkaar afgestemd. Dankzij de harmonische verhouding tussen occlusaal vlak en anatomische vorm hebben deze (pre)molaren een optimale kauwfunctionaliteit.

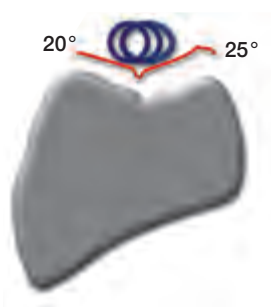

De occlusale vormgeving zorgt voor vrijheid van occlusie in de centrale relatie dankzij de 'centric stops'. Dit zorgt voor een gecontroleerde beweging tijdens het kauwen waarbij de gewrichten niet worden belast.

Indicatiegebieden

- Volledige prothesen
- implantaatconstructies
- Dubbelstructuren (telescoop/conus)
- Combinatiewerkstukken met precisieverankeringen
- Frameprothesen



Opstel mogelijkheden

- 'Een-tegen-een'-opstelling
- 'Een-tegen-twee'-opstelling
- Gebalanceerde en gelingualiseerde occlusie
- Front-hoektandgeleiding
- Groepsgeleiding

Veracia SA

Bij de leeftijd passende vormen voor een comfortabele prothese


Bij de ontwikkeling van de semianatomische Veracia SA-frontelementen en (pre)molaren is rekening gehouden met de afslijting van de nog aanwezige natuurlijke dentitie. Veracia SA heeft dezelfde anatomische kenmerken als Veracia, maar de elementen zijn op specifieke plaatsen voorzien van slijtageplekken. Het resultaat: een aanzienlijk beter kauwvermogen, een aangenaam draagcomfort en veel minder belasting voor het kaakgewricht.

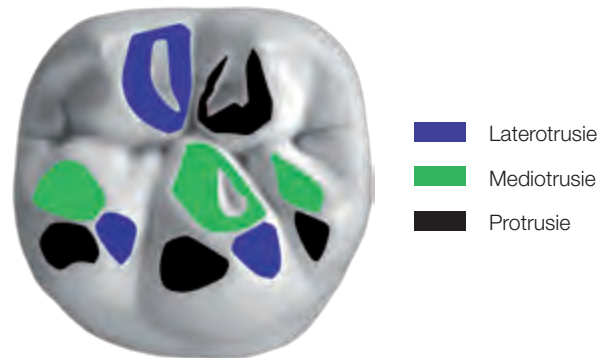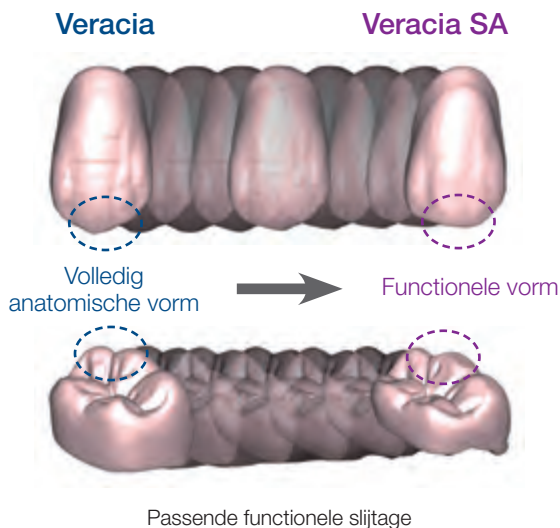

De functionele slijtageplekken zijn ideaal voor de gebalanceerde of gelingualiseerde occlusie, zodat na de opstelling nauwelijks inslijpcorrecties nodig zijn.

Uitstekende fysische eigenschappen dankzij MF-H-composiettechnologie

De gebitselementen Veracia en Veracia SA zijn gemaakt van microge vulde hybridecomposiet (MF-H; Micro Filled Hybrid Composite) en versterkt met glasvulstof. Deze homogene structuur zorgt voor zeer goede fysische eigenschappen en een uitstekende slijtvastheid. Ook worden de elementen hierdoor goed verdragen in de mond.

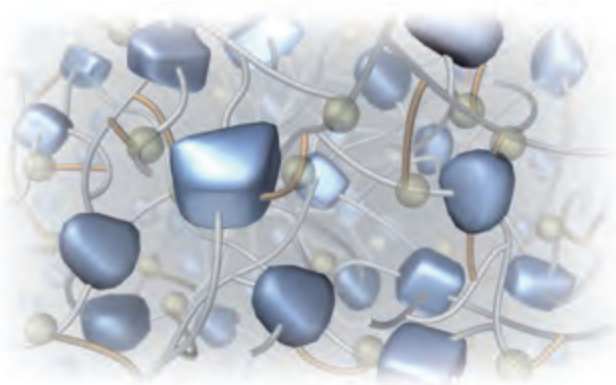

Daarom kiest u voor Veracia / Veracia SA

- Functionele gebitselementen passend bij de leeftijd
- Niet afhankelijk van een occlusieconcept
- U bespaart tijd bij het opstellen
- Gebalanceerde occlusie zit 'ingebouwd' in de opstelling
- Geschikt voor elk articulatorsysteem
- Efficiënte vervaardiging in het tandtechnisch laboratorium
- Definitieve prothesen zijn altijd van hoge kwaliteit

Tanden en kiezen die elkaar weten te vinden

Met de gebitselementen van Veracia en Veracia SA kunt u efficiënter werken bij het maken van prothesen. De systemen zijn zo op elkaar afgestemd dat u de volledig anatomische frontelementen in alle prothetische situaties kunt combineren met de semianatomische (pre)molaren.



Veracia Anterior

BOVENKAAK



Vierkant

S4	42,8 10,4 8,0	
S5	45,5 11,1 8,5	
S6	48,2 11,7 9,0	



Rechthoekig

ST4	42,8 10,7 8,0	
ST5	45,5 11,4 8,5	
ST6	48,2 12,0 9,0	



Lang/vierkant

LS5	45,5 11,9 8,5	
LS6	48,2 12,5 9,0	



Lang/rechthoekig

LT5	45,5 12,1 8,5	
LT6	48,2 12,7 9,0	



Ovaal

O4	42,8 9,9 8,0	
O5	45,5 10,5 8,5	
O6	48,2 11,1 9,0	



Lang/ovaal

LO5	45,5 12,0 8,5	
LO6	48,2 12,8 9,0	

Veracia Posterior

ONDERKAAK



Standaard

NA4	33,2 9,6 4,8	
NA5	35,3 10,2 5,0	
NA6	37,3 10,8 5,2	
A4	33,2 9,3 4,8	
A5	35,3 9,8 5,0	
A6	37,3 10,4 5,2	





Lang

LA5	35,3 10,9 5,0	
LA6	37,3 11,5 5,2	

BOVENKAAK / ONDERKAAK



S	30,0 10,1	
30	32,5 10,1	
M	32,0 10,8	
32	34,5 10,8	
L	34,0 11,4	
34	36,5 11,4	

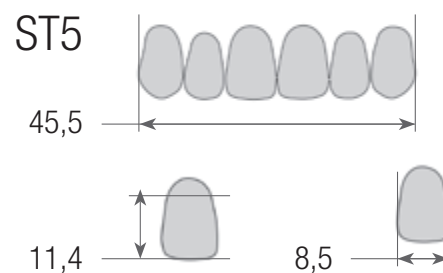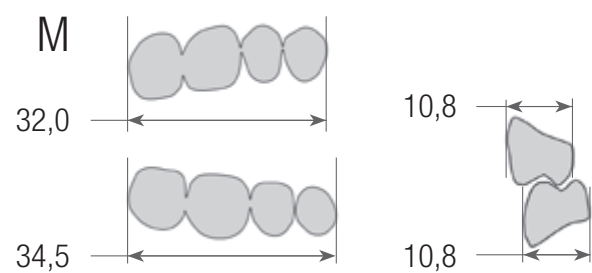

Alle afmetingen in millimeters

Veracia SA Anterior

BOVENKAAK / ONDERKAAK



Vierkant

S4	43,0 9,2 7,9	
S5	45,7 9,8 8,4	
S6	48,5 10,4 8,9	
S7	51,2 11,0 9,4	



Rechthoekig

ST4	43,5 9,6 8,0	
ST5	46,3 10,2 8,5	
ST6	49,0 10,8 9,0	
ST7	51,8 11,4 9,5	




Ovaal

O4	43,4 10,4 8,0	
O5	46,2 11,0 8,5	
O6	49,0 11,7 9,0	
O7	51,8 12,4 9,5	



Met abrasie

MA4	32,5 9,4 4,7	
MA5	34,6 10,1 5,0	
MA6	36,7 10,7 5,3	
MA7	38,8 11,3 5,6	
MA8	40,9 11,9 5,9	

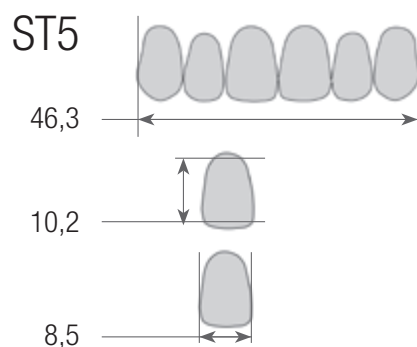


De frontelementen en (pre)molaren zijn verkrijgbaar in de VITA* Classical kleuren A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 en in de SHOFU whiteningkleur W1.

Veracia SA Posterior

BOVENKAAK / ONDERKAAK



S28	28,0 8,7 30,0 8,9	
S30	30,0 9,4 32,0 9,5	
S32	32,0 10,0 34,0 9,9	
S34	34,0 10,6 36,0 10,7	
S36	36,0 11,2 38,0 11,3	

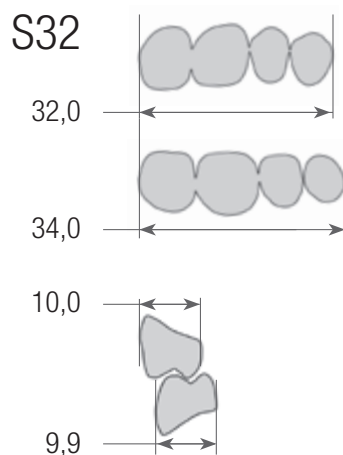

Alle afmetingen in millimeters

Aanbevolen frontelementen BK/OK

Verticale overbeet	1 mm		BK	S4 ST4 O4	S5 ST5 O5	S6 ST6 O6	S7 ST7 O7
Horizontale overbeet	3-4 mm		OK	MA4	MA5	MA6	MA7
Verticale overbeet	1 mm		BK	S4 ST4 O4	S5 ST5 O5	S6 ST6 O6	S7 ST7 O7
Horizontale overbeet	0-1 mm		OK	MA5	MA6	MA7	MA8

Veracia & Veracia SA

Aanbevolen combinaties

	Veracia Anterior				Veracia Posterior	Veracia SA Posterior
	Boven	Onder			Boven/Onder	Boven/Onder
Vierkant	S4	NA4	A4		S	30
	S5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	LS5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	S6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
	LS6	LS6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
Rechthoekig	ST4	NA4	A4		S	30
	ST5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	LT5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	ST6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
	LT6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
Ovaal	O4	NA4	A4		S	30
	O5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	LO5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	O6	NA6	A6	LA5	M / L	32 / 34 / 36
	LO6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36

In de bovenstaande tabellen staan aanbevolen combinaties. Uiteraard kunt u de volledig anatomische frontelementen Veracia Anterior, afhankelijk van de casus, ook individueel combineren met de semi-anatomische (pre)molaren Veracia SA Posterior.

* VITA is een geregistreerd merk van VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

