



De restauratie is met Dura-Green DIA en ZiLMaster Coarse voorbereid voor hoogglans polijsten.



ZirGloss-polijstpasta is vast, spat niet bij het opnemen met het borsteltje en is heel zuinig in het gebruik.




Zelfs de kleinste anatomische details op het kauwvlak kunnen heel gericht en goed worden gepolijst met een borsteltje van bizon- of geitenhaar.



Een perfect polijstresultaat: alle contouren en vlakken zijn mooi gepolijst en binnen enkele seconden perfect op hoogglans.


Bestelinformatie

Dura-Green DIA

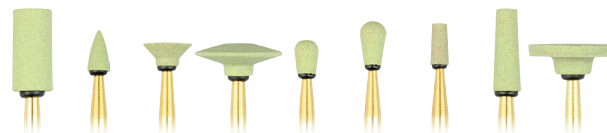

Vorm	CY5	FL3	IC5	KN7	RD2	RD3	TC2	TC4	WH6
HP 3 st.		0158	0162			0159	0161	0155	
HP 2 st.	0156			0154					0157
CA 3 st.		0163				0164	0165		
FG 3 st.		0168			0167				

ZiLMaster

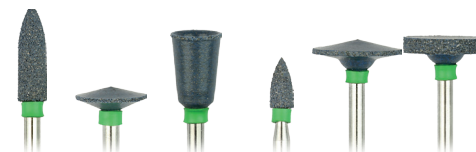

	Vorm	Bullet	Knife	Cup	Minipoint	KN7	WH6
Coarse	HP 3 st.	0640			0641	0642	0643
	WA 3 st.	0658	0662	0663	0661		

'Unmounted wheels' zijn ook verkrijgbaar.



ZirGloss

Polijstpasta voor zirkoniumdioxide, lithiumdisilicaat en keramiek
Bestelnr. N0002



Manufacturer
SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan
EC REP SHOFU DENTAL GmbH
An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.de

050107 - 11/2020

ZirGloss

Hoogwaardige polijstpasta voor tijdbesparend polijsten van zirkoniumdioxide, lithiumdisilicaat en keramiek



In drie stappen naar het perfecte oppervlak


Een slecht gepolijst oppervlak van zirkoniumdioxide bevordert niet alleen de afzetting van plaque, maar kan ook niet-fysiologische occlusale slijtage aan de natuurlijke antagonisten veroorzaken. Daarom is een kwalitatief hoogwaardig gepolijst oppervlak zo belangrijk. Het zorgt er bij monolithische, metaalvrije restauraties voor dat deze er heel lang mooi uit blijven zien, hun functie goed en nauwkeurig kunnen uitoefenen en voor de patiënt comfortabel aanvoelen.

Met de beproefde **Dura-Green DIA**-diamantslijpsteentjes, de **ZiLMaster Coarse**-polijstrubbers en de nieuwe **ZirGloss**-polijstpasta lukt dat nu in drie stappen. Bij dit systeem is goed nagedacht over het stap-voor-stap vergroten van de fijnheidsgraad van de drie producten van grof naar fijn. Het resultaat? Perfect verzegelde oppervlakken in een mum van tijd en zo goed als afgeglansd.

NIEUW!



1 Vormgeven en corrigeren met **Dura-Green DIA**

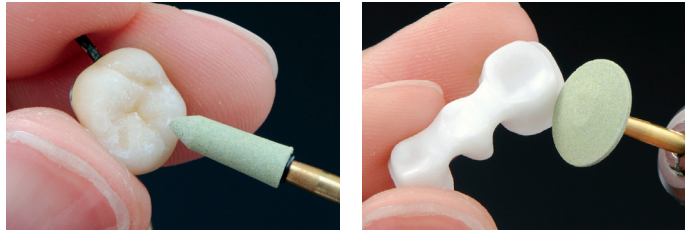


De geringe werkdruk en de trillingsarme loop zorgen ervoor dat de gebruiker comfortabel kan slijpen.

Dankzij de fijne diamantstructuur van de Dura-Green DIA-slijpelementen kunt u de buitencontouren of het kauwvlak gericht en weefselbesparend corrigeren na het wegpolijsten van vroege contacten, zonder risico op chipping of microfracturen.

Het fijne slijpvlak vormt de ideale basis voor de volgende stap in de polijstprocedure. De hoge randstabiliteit en lange levensduur maken het werken met Dura-Green DIA ook economisch rendabel.

2 Voorpolijsten en afwerken met **ZiLMaster Coarse**

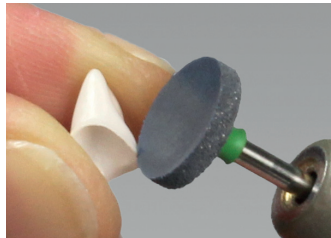

Kleine correcties, uitdunnen van randen en inslijpen van contactpunten met ZiLMaster Coarse.

De Coarse-polijstinstrumenten van het ZiLMaster 3-staps-polijstsysteem bestaan voor meer dan 70 procent uit industriediamant met korrelgrootte 150 µm.

De samenstelling van deze polijstrubbers is ideaal voor duurzaam voorpolijsten of afwerken van al geslepen regio's waar nog kleine correcties nodig zijn.

3 Volmaakt op hoogglans met **ZirGloss**

Met de hoogwaardige polijstpasta ZirGloss kunt u met name monolithische, volledig keramische restauraties van zirkoniumdioxide en lithiumdisilicaat in luttele seconden polijsten. De pasta bestaat uit een basispasta met diamanten aluminiumoxidedeeltjes van op elkaar afgestemde korrelgroottes.

Afhankelijk van de aandrukkraft van het geiten- of bizonharen borsteltje en de temperatuurontwikkeling geeft de pasta deze slijpdeeltjes gericht vrij tijdens het polijsten met het handstuk. Het resultaat: een dicht, hoogglanzend oppervlak met alle contouren waardoor een glansbrand praktisch overbodig is.

HIGHLIGHTS

Ideaal voor zirkoniumdioxide en lithiumdisilicaat

Brengt monolithische restauraties snel op hoogglans

Vaste consistentie, spat niet bij het opnemen

Zuinig in het gebruik: weinig pasta nodig voor een optimaal resultaat

Maakt glansbrand praktisch overbodig